

MCI 早期発見タブレット
LMN-MSP01
アプリ取扱説明書
～アプリ動作 編～

1.0 版
2024 年 7 月 16 日

株式会社 LIMNO
事業企画部

目次

プログラムを起動する	1
基本設定を行う	2
設定項目一覧	5
保存先を開く	7
端末設定を開く	9
検査までの操作の流れ	9
利用者を登録して検査プログラムを実施する	10
登録済みの利用者に検査プログラムを実施する	14
利用者を登録しないで検査プログラムを実施する	18
概要	21
もの忘れ相談プログラム	22
もの忘れ相談プログラムの流れ	22
もの忘れ相談プログラム結果を表示・印刷する	23
もの忘れ相談プログラムを継続する	24
検査プログラムの途中でひとつ前の画面に戻る、終了する	24
もの忘れ相談プログラム結果について	27
TDAS プログラム	28
TDAS プログラムの流れ	28
TDAS プログラム結果を表示・印刷する	29
TDAS プログラムを継続する	30
検査プログラムを終了する（トップメニュー画面に戻る）	30
TDAS プログラム結果について	32
概要	33
データ管理画面を開く	33
データ管理画面	34
利用者情報を事前登録・検索・変更・削除する	35
利用者一覧画面	35
利用者情報を事前登録する	36
利用者情報を検索する	38
登録内容を変更する	40
登録内容を削除する	43
一括処理をする	45
プログラム検査結果を確認・印刷・削除する	48
データ一覧画面	48
結果の詳細を確認する	49
結果を印刷する	50
結果を削除する	51
データベースをバックアップする	52

バックアップから復元する	53
--------------------	----

プログラムを起動する

1 タブレットの電源をオンにします。

デスクトップ画面が表示され、数十秒後に、自動的にプログラムが起動します。

【注】起動中は、画面に触れないでください。

個人情報の共同利用と提供についての同意画面が表示されます。

[同意する]を押して、同意します。

同意画面を表示しない場合は、「次回以降表示しない」をチェックするか、設定画面で「ユーザ同意表示」を“表示しない”に設定してください。詳細は、「基本設定を行う」を参照してください。

もの忘れ相談プログラム

個人情報の利用及び提供に関する同意について

貴施設において、物忘れ相談プログラム(以下「本プログラム」といいます)をご使用いただくに当たり、本プログラムによるチェックを受けた方(利用者)の個人情報及びチェック結果等のデータ(以下、総称して「データ」といいます)を、貴施設から株式会社LIMNO(以下「LIMNO」といいます)に提供していただくことに、ご同意ください。提供していただくデータの項目、利用目的等は以下のとおりです。

(1) LIMNOは、貴施設から提供していただいたデータを、関係法令・ガイドライン等に従って適切に管理し、①本プログラムの改善・改良、②データの評価・分析、③医療・介護・福祉に関わるシステム・サービスの研究開発等の目的のために利用します。なお、提供していただくデータの項目は、以下のとおりです。

- ・利用者の氏名、ID、性別、年齢、生年月日
- ・利用者が本プログラムを実施して得られた結果

☐ 次回以降表示しない

※この設定は、設定画面からいつでも変更できます

同意しない 同意する

2 トップメニュー画面が表示されます。



タブレットのディスク容量が不足している場合、以下のウインドウが表示されます。
[閉じる]を押してウインドウを閉じた後、容量を確保してください。



基本設定を行う

本プログラム全般に関する基本設定を行います。

- 1 トップメニュー画面で[設定]を押し、設定画面を表示します。



2 各項目を設定します。

[トップメニューへ](#)
[ひとつ前に戻る](#)

同意表示

ユーザー同意表示	☒ 表示する ☐ 表示しない	利用者同意表示	☒ 表示する ☐ 表示しない
----------	---	---------	---

画面表示

待受画面表示	☒ 表示する ☐ 表示しない	結果画面表示	☒ 表示する ☐ 表示しない
--------	---	--------	---

利用者情報

利用者情報入力モード	☒ 詳細 ☐ 簡易 ☐ 入力しない	ID入力	☒ 入力する ☐ 入力しない
ID自動繰上がり	☐ 繰上がりする ☒ 繰上がりしない	ID0詰め	☐ 0詰めする ☒ 0詰めしない
名前入力	☒ 入力する ☐ 入力しない	性別選択	☒ 選択する ☐ 選択しない
年齢入力	☒ 生年月日 ☐ 年代 ☐ 入力しない	生年月日の表示	☒ 和暦 ☐ 西暦
サブID入力	☐ 入力する ☒ 入力しない	サブID	000000 ※最大12桁

練習設定

MSP練習	☒ 練習する ☐ 練習しない	TDAS練習	☒ 練習する ☐ 練習しない
-------	---	--------	---

出力設定

結果印刷	☒ 印刷する ☐ 印刷しない		
MSP結果印刷コメント	☒ 印刷する ☐ 印刷しない	TDAS結果印刷コメント	☒ 印刷する ☐ 印刷しない
結果CSV出力	☐ 出力する ☒ 出力しない	結果CSV保存先	
結果PDF出力	☐ 出力する ☒ 出力しない	結果PDF保存先	

チェック設定

チェック固定	☒ 固定しない ☐ MSP ☐ TDAS
--------	---

3 各項目の入力を完了し、[更新する]を押します。

施設名	※最大全角30文字
もの忘れ結果レポート アドバイスコメント	1/150
TDAS結果レポート アドバイスコメント	1/150

Ver.01.00.000
[▶ライセンス情報](#)

更新する



4 確認ウインドウが表示されます。[更新する]を押して、設定の更新を確定します。

The screenshot shows a web application interface with a dark blue header containing navigation links: "トップメニューへ" and "ひとつ前に戻る". The main content area is titled "同意表示" and contains several settings sections. A modal dialog box is centered on the screen, asking "この内容で更新しますか？" (Do you want to update with this content?). The dialog has two buttons: "閉じる" (Close) and "更新する" (Update). A hand icon is pointing at the "更新する" button. The background settings include sections for "画面表示" (Screen Display) and "利用者情報" (User Information), each with various radio button options for displaying or inputting data.

同意表示	
ユーザー同意表示	☒ 表示する ☐ 表示しない
利用者同意表示	☒ 表示する ☐ 表示しない

画面表示	
待受画面表示	☐ 表示する ☐ 表示しない

利用者情報	
名前入力	☒ 入力する ☐ 入力しない
年齢入力	☒ 生年月日 ☐ 年代 ☐ 入力しない
サブID入力	☒ 入力する ☐ 入力しない

性別選択	
性別選択	☒ 選択する ☐ 選択しない
生年月日の表示	☒ 和暦 ☐ 西暦
サブID	000000 ※最大12桁

設定項目一覧

設定項目は以下の通りです。下線（ ）は初期値を示します。

項 目	設定内容	説 明
ユーザ同意表示	<u>表示する</u> ／表示しない	各施設における、個人情報の共同利用および提供に関する同意画面を表示するかどうかを設定します。
利用者同意表示	<u>表示する</u> ／表示しない	各利用者*のデータを研究目的などで使用することに関する同意画面を表示するかどうかを設定します。 なお、利用者一覧のCSV一覧の書き出し時に同意結果を表示する。 *検査プログラムを受ける人を指します。
待受画面表示	<u>表示する</u> ／表示しない	待ち受け画面*を表示するかどうかを設定します。 *検査プログラム実施時にヘッドフォンの装着をお知らせする画面を指します。
結果画面表示	<u>表示する</u> ／表示しない	検査プログラム結果の画面を表示するかどうかを設定します。
利用者情報入力モード	<u>詳細</u> ／簡易／入力しない	利用者*情報を入力するモードを設定します。 *検査プログラムを受ける人を指します。
ID 入力	<u>入力する</u> ／入力しない	ID を入力するかどうかを設定します。
ID 自動繰上がり	<u>繰上がりする</u> ／繰上がりしない	「ID 入力」を“する”に設定した場合、ID を自動で繰り上げるかどうかを設定します。
ID 0 詰め	0 詰めする／ <u>0 詰めしない</u>	「ID 入力」を“入力する”に設定し、0 詰めをするかどうかを設定します。
名前入力	<u>入力する</u> ／入力しない	名前を入力するかどうかを設定します。
性別選択	<u>選択する</u> ／選択しない	性別を入力するかどうかを設定します。
年齢入力	<u>生年月日</u> ／年代 ／入力しない	年齢入力の書式を設定します。 ・生年月日 生年月日を入力します。 ・年代 10 代～90 代で該当する年代を選択します。 ・しない 年齢を入力しません。
生年月日の表示	<u>和暦</u> ／西暦	生年月日の表示形式を設定します。
サブ ID 入力	<u>入力する</u> ／入力しない	サブ ID を入力するかどうかを設定します。
サブ ID	任意の半角数字(最大 12 桁)	サブ ID を設定します。
MSP 練習	<u>練習する</u> ／練習しない	もの忘れ相談プログラムの開始前に操作の練習画面を表示するかどうかを設定します。
TDAS 練習	<u>練習する</u> ／練習しない	TDAS プログラムの開始前に操作の練習画面を表示するかどうかを設定します。
結果印刷	<u>印刷する</u> ／印刷しない	・印刷する 検査プログラム終了後に結果を自動的にプリンターで印刷します。 ・印刷しない 印刷しません。
MSP 結果印刷コメント	<u>印刷する</u> ／印刷しない	もの忘れ相談プログラムの結果に「15 点～14 点ではとくに問題ないと思われますが、13 点～0 点では認知機能の低下が疑われます。」のコメントを表示するかを設定します。
TDAS 結果印刷コメント	<u>印刷する</u> ／印刷しない	TDAS プログラムの結果に「0～6 点以下では特に問題ないと思われますが、7～13 点以下では軽度認知機能の低下が疑われます。14 点以上では認知症が疑われます。」のコメントを表示するかを設定します。
結果 CSV 出力	<u>出力する</u> ／出力しない	検査プログラム結果を CSV 形式で出力するかどうかを設定します。
結果 CSV 保存先	任意の保存先	「結果 CSV 出力」を“出力する”に設定した場合、結果の保存先を設定します。 テキストボックスを押してフォルダ選択画面を表示させ、保存先のフォルダを選択してください。
結果 PDF 出力	<u>出力する</u> ／出力しない	検査プログラム結果を PDF 形式で出力するかどうかを設定します。
結果 PDF 保存先	任意の保存先	「結果 PDF 出力」を“出力する”に設定した場合、結果の保存先を設定します。 テキストボックスを押してフォルダ選択画面を表示させ、保存先のフォルダを選択してください。
チェック固定	<u>固定しない</u> ／MSP／TDAS	検査プログラムの種別を固定するかどうかを設定します。
元号	全角 2 文字以内（ <u>空欄</u> ）	元号を設定します（全角 2 文字）。
新元号の開始年月日	任意の年月日	元号を設定した場合の開始年月日を設定します。
見当識 年	和暦（開始年 2 桁） <u>01</u> ／	日時の見当識の「年」の表示方法を設定します。また、そ

項 目	設定内容	説 明
	西暦（開始年 4 桁）（2020）	それぞれの開始年数を設定します。
施設番号	任意の半角数字(最大 5 桁)	施設番号を設定します。
施設名	全角 30 文字以内	検査プログラム結果に印字する施設名を設定します。
もの忘れ結果レポート アドバイスコメント	全角 150 文字以内（空欄）	もの忘れ相談プログラム施設の任意のレポートコメントを設定します。
TDAS 結果レポート アドバイスコメント	全角 150 文字以内（空欄）	TDAS プログラム施設の任意のレポートコメントを設定します。

保存先を開く

基本設定にて設定した「結果 PDF 保存先」または「結果 CSV 保存先」のフォルダを開きます。

1 トップメニュー画面で[保存先]を押します。




2 呼び出す保存先を選択します。




[PDF]のボタンを押すと、基本設定にて「結果 PDF 保存先」に指定したフォルダが開きます。基本設定の「結果 PDF 保存先」にフォルダの指定がされていない場合は、端末の「Documents」フォルダが開きます。
[CSV]のボタンを押すと、基本設定にて「結果 CSV 保存先」に指定したフォルダが開きます。基本設定の「結果 CSV 保存先」にフォルダの指定がされていない場合は、端末の「Documents」フォルダが開きます。

3 「結果 PDF 保存先」に指定されたフォルダの表示例：

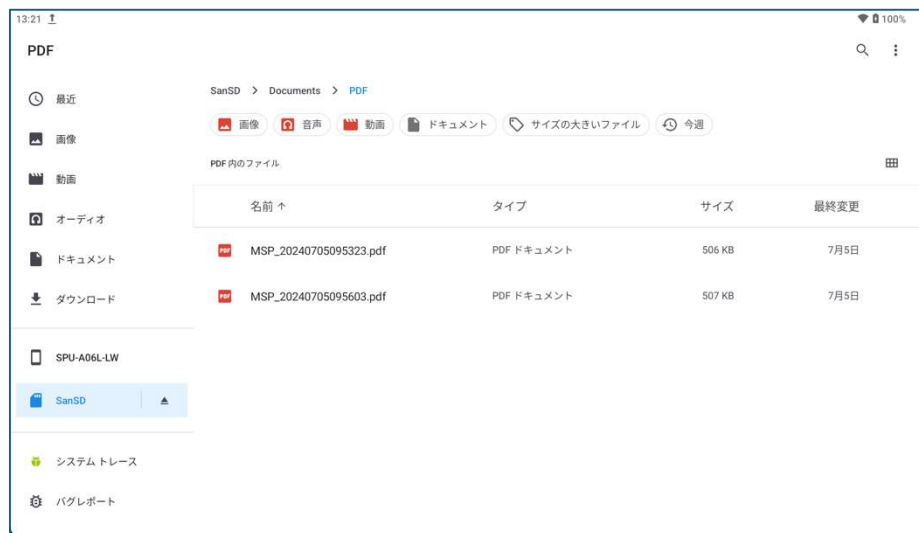

4 「結果 CSV 保存先」に指定されたフォルダの表示例：

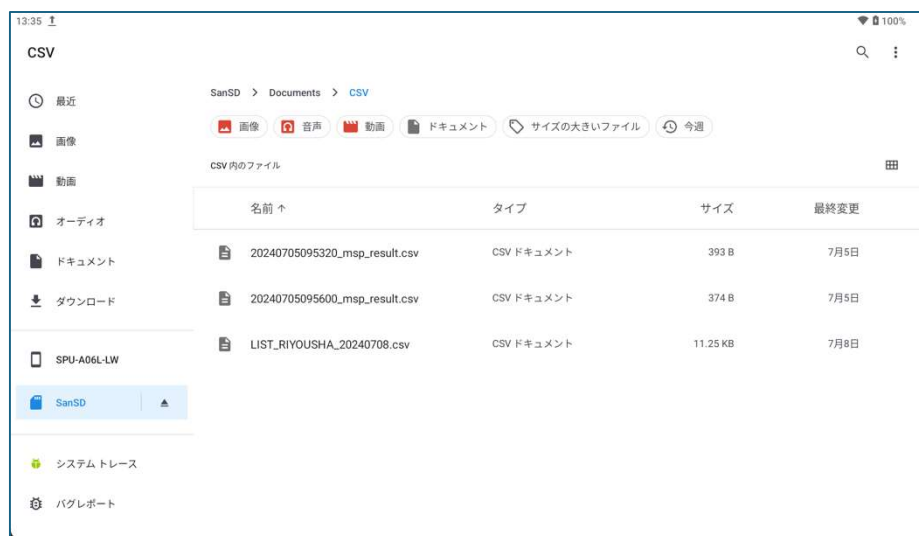

5 「結果 PDF 保存先」または「結果 CSV 保存先」にフォルダが指定されていなかった場合に表示される「Documents」フォルダの表示例：



端末設定を開く

本端末に関する設定画面を開きます。

1 トップメニュー画面で[端末設定]を押し、端末の設定画面を表示します。



2 各項目を設定します。



検査までの操作の流れ

検査プログラムの操作は利用者ではなく、監督者*が行ってください。

※監督者とは、検査プログラムの管理者のことを指します。

本プログラムの操作は、以下の3通りがあります。

- ・利用者を登録して検査プログラムを実施する場合
- ・登録済みの利用者に対して検査プログラムを実施する場合
- ・利用者を登録しないで検査プログラムを実施する場合

利用者を登録して検査プログラムを実施する

検査プログラムの実施時に利用者を登録します。

設定画面で「利用者情報入力モード」を“詳細”または“簡易”に設定してください。詳細は、「基本設定を行う」を参照してください。

- 1 トップメニュー画面で[チェック開始]を押します。



- 2 ヘッドフォンを装着して、下記のいずれかの画面を押します。画面を押すまで繰り返し表示されます。
- 画面を表示しない場合は、設定画面で「待受画面表示」を“表示しない”に設定してください。詳細は、「設定項目一覧」を参照してください。

**ヘッドフォンを装着して
音量を確認してください。**


補聴器装着の方は、補聴器を外し
ヘッドフォンを装着してください。



画面をタッチしてください。



3 検査プログラム選択画面で、実施する検査プログラムのボタンを押します。

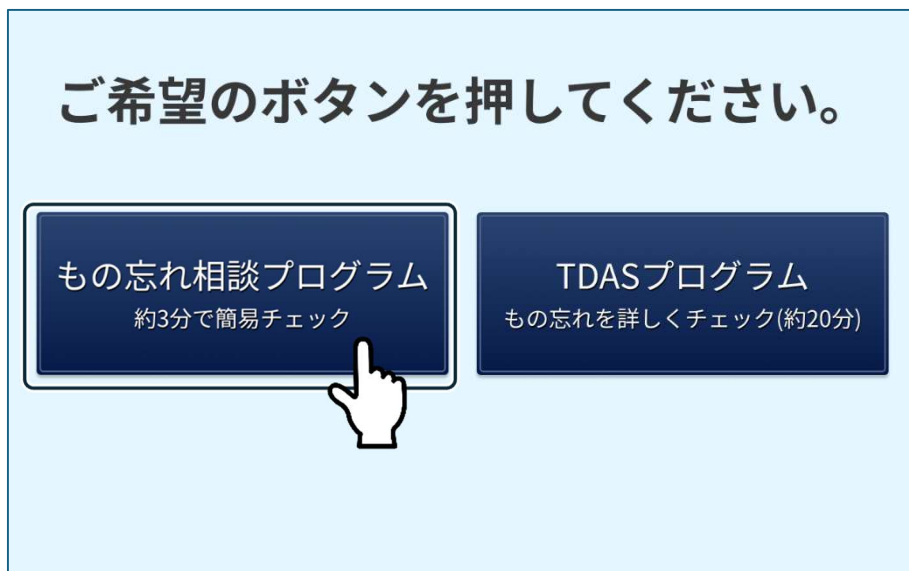


4 利用者登録・選択画面の各項目を入力し、[登録する]を押します。

The screenshot shows the "利用者情報登録・選択" (User Information Registration/Selection) screen. It has several input fields: "IDを入力してください(最大20桁)" (Enter ID (max 20 digits)) with "000000", "サブIDを入力してください(最大12桁)" (Enter Sub-ID (max 12 digits)) with "000000", and "お名前を入力してください" (Enter name) with "セイ" and "メイ". Below these are fields for "生年月日を入力してください" (Enter birth date) with "和暦" (Heisei), "元" (Gen), "年" (Year), "01" (Month), "01" (Day), and "性別を選択してください" (Select gender) with "未選択" (Unselected), "男性" (Male), and "女性" (Female). A "登録する" (Register) button is in the top right, with a hand icon pointing at it. At the bottom, there is a keyboard overlay with buttons for numbers, letters, and symbols, including "設定" (Settings), "閉じる" (Close), "削除" (Delete), and "完了" (Complete).

5 利用者のデータを研究目的などで使用することに関する同意画面が表示されます。

[同意しない/同意する]を選択し、押します。

同意画面を表示しない場合は、設定画面で「利用者同意表示」を“表示しない”に設定してください。詳細は、「基本設定を行う」を参照してください。

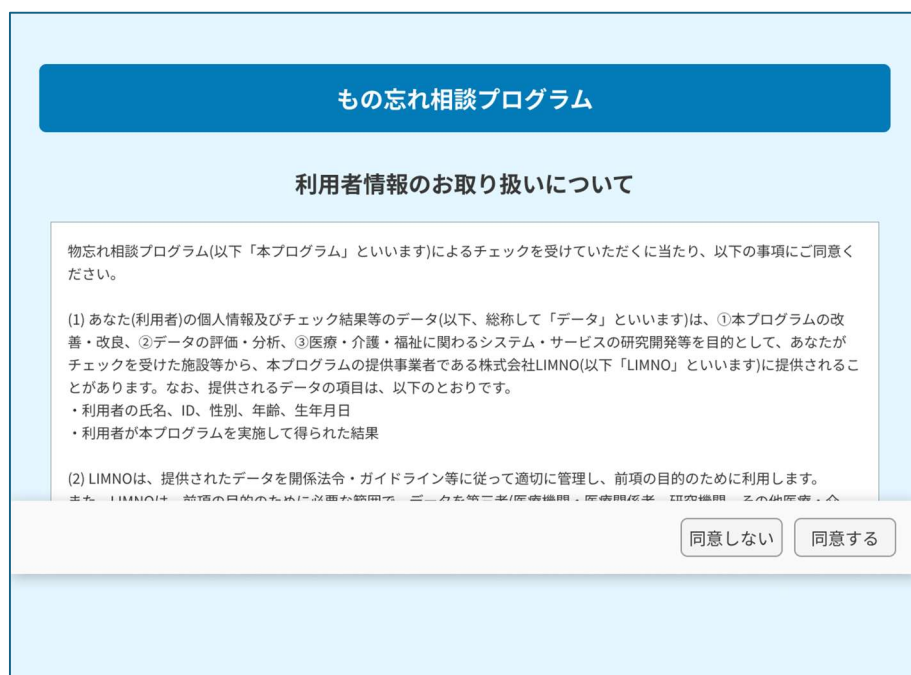

このスクリーンショットは「もの忘れ相談プログラム」の同意画面です。タイトル「利用者情報のお取り扱いについて」の下に、利用規約の概要と同意ボタンがあります。

もの忘れ相談プログラム(以下「本プログラム」といいます)によるチェックを受けていただくに当たり、以下の事項にご同意ください。

(1) あなた(利用者)の個人情報及びチェック結果等のデータ(以下、総称して「データ」といいます)は、①本プログラムの改善・改良、②データの評価・分析、③医療・介護・福祉に関わるシステム・サービスの研究開発等を目的として、あなたがチェックを受けた施設等から、本プログラムの提供事業者である株式会社LIMNO(以下「LIMNO」といいます)に提供される場合があります。なお、提供されるデータの項目は、以下のとおりです。

- ・利用者の氏名、ID、性別、年齢、生年月日
- ・利用者が本プログラムを実施して得られた結果

(2) LIMNOは、提供されたデータを関係法令・ガイドライン等に従って適切に管理し、前項の目的のために利用します。

同意しない 同意する

登録済みのIDを入力すると、下記のメッセージが表示されます。



このスクリーンショットは、ID重複メッセージの表示画面です。背景には登録画面の一部が見えます。

このIDは既に登録されています。

下記の利用者情報で進みますがよろしいですか？
変更したい場合はIDを変更してください。

ID : 00000000000000000000 サブID : 000000000000
名前 : リムノ タロウ 性別 : 男性
生年月日 : 2024/08/02

変更する 進む

新規で利用者を登録して検査プログラムを実施する場合は、[変更する]を押して、利用者登録・選択画面で再度入力してください。登録済みの利用者で検査プログラムを実施する場合は、[進む]を押してください。

6 メニュー選択画面で選択した検査プログラムが起動します。

[開始]を押して、検査プログラムを開始します。

検査プログラムの途中で中断すると、診断選択画面に戻ります。中断方法の詳細は、「検査プログラムの途中で終了する」を参照してください。



登録済みの利用者に検査プログラムを実施する

利用者情報を登録済みの場合、利用者一覧画面から利用者を選択し、検査プログラムを実施します。

利用者情報を事前に登録する方法は、「利用者情報を事前登録・検索・変更・削除する」を参照してください。

1 トップメニュー画面の[データ管理]を押し、データ管理画面を表示します。



2 [利用者一覧]タブを押し、利用者一覧画面を表示します。

トップメニューへ ◀ ひとつ前に戻る

利用者一覧 データー一覧(もの忘れ/TDAS) バックアップ

Q 利用者検索

セイ リムノ メイ タロウ 性別 ☒ 未選択 ☒ 男性 ☒ 女性

ID 000000 ~ 55555 サブID 000000 ~ 000000

3 検索条件を入力し、[検索]を押して、対象の利用者を絞り込みます。

4 検査プログラムを実施する利用者の [詳細 >] を押し、利用者情報確認画面を表示します。

利用者情報が登録されていない場合は、利用者を登録してください。詳細は、「利用者を登録して検査プログラムを実施する」を参照してください。

トップメニューへ ◀ ひとつ前に戻る

利用者一覧 データー一覧(もの忘れ/TDAS) バックアップ

Q 利用者検索

セイ リムノ メイ タロウ 性別 ☒ 未選択 ☒ 男性 ☒ 女性

ID 000000 ~ 55555 サブID 000000 ~ 000000

日付 2024/03/01 ~ 2024/04/30

クリア(全件表示) 検索

+ 新規登録 一括削除 一覧印刷 CSV書き出し

登録日	ID	サブID	名前	性別	生年月日	詳細 >
2024/08/20	12345		リムノ タロウ	男性	大正15年01月01日	詳細 >
2024/08/19	3333		リムノ ハナコ	女性	昭和12年03月04日	詳細 >
2024/08/18	1		リムノ タロウ	男性	昭和30年01月01日	詳細 >

5 実施する検査プログラムを押します。

ID	54321
サブID	-
お名前	リムノ タロウ
生年月日	大正15年3月2日
性別	男性

6 利用者のデータを研究目的などで表示することに関する同意画面が表示されます。

[同意しない/同意する]を押します。

同意画面を表示しない場合は、設定画面で「利用者同意表示」を“表示しない”に設定してください。

詳細は、「基本設定を行う」を参照してください。

もの忘れ相談プログラム(以下「本プログラム」といいます)によるチェックを受けていただくに当たり、以下の事項にご同意ください。

(1) あなた(利用者)の個人情報及びチェック結果等のデータ(以下、総称して「データ」といいます)は、①本プログラムの改善・改良、②データの評価・分析、③医療・介護・福祉に関わるシステム・サービスの研究開発等を目的として、あなたがチェックを受けた施設等から、本プログラムの提供事業者である株式会社LIMNO(以下「LIMNO」といいます)に提供されることがあります。なお、提供されるデータの項目は、以下のとおりです。

- ・利用者の氏名、ID、性別、年齢、生年月日
- ・利用者が本プログラムを実施して得られた結果

(2) LIMNOは、提供されたデータを関係法令・ガイドライン等に従って適切に管理し、前項の目的のために利用します。

また、LIMNOは、前項の目的のために必要に応じて、データを第三者(医療機関、医療関係者、研究機関、その他医療・介護関係者)に提供することがあります。

7 ヘッドフォンを装着して、下記のいずれかの画面を押します。

押すまで画面は繰り返し表示されます。

画面を表示しない場合は、設定画面で「待受画面表示」を“表示しない”に設定してください。

詳細は、「設定項目一覧」を参照してください。

**ヘッドフォンを装着して
音量を確認してください。**

補聴器装着の方は、補聴器を外し
ヘッドフォンを装着してください。



画面をタッチしてください。



8 もの忘れ相談プログラムが起動します。

[開始]を押して、もの忘れ相談プログラムを開始します。

もの忘れ相談プログラムの途中で中断すると、診断選択画面に戻ります。

中断方法の詳細は、「検査プログラムの途中で終了する」を参照してください。



利用者を登録しないで検査プログラムを実施する

利用者情報を登録せず、検査プログラムを実施できます。

設定画面で「利用者情報入力モード」を“入力しない”に設定してください。詳細は、「基本設定を行う」を参照してください。

1 トップメニュー画面で[チェック開始]を押します。



2 ヘッドフォンを装着して、下記のいずれかの画面を押します。

押すまで画面は繰り返し表示されます。

画面を表示しない場合は、設定画面で「待受画面表示」を“表示しない”に設定してください。詳細は、「設定画面一覧」を参照してください。

**ヘッドフォンを装着して
音量を確認してください。**


補聴器装着の方は、補聴器を外し
ヘッドフォンを装着してください。



画面をタッチしてください。



3 検査プログラム選択画面で、実施する検査プログラムのボタンを押します。

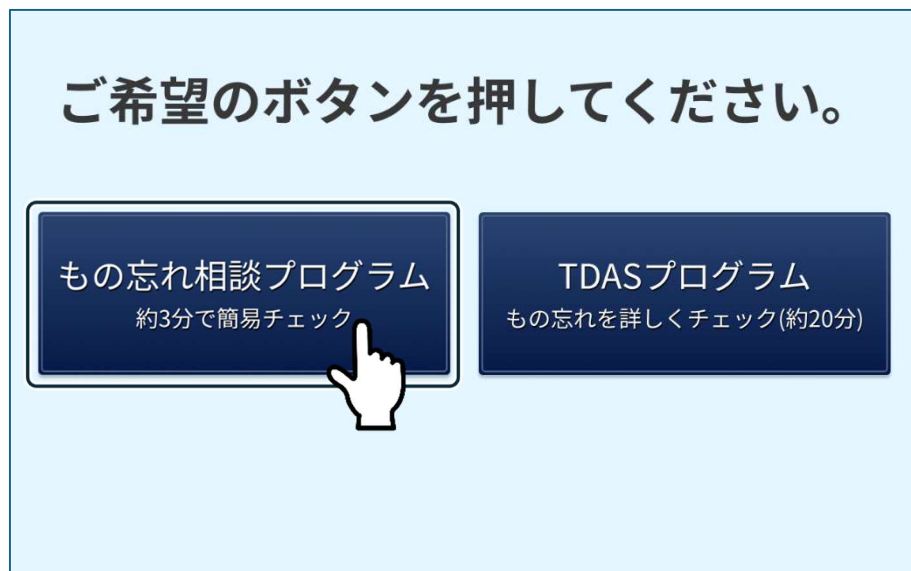

4 選択した「もの忘れ相談プログラム」が起動します。

[開始]を押して、もの忘れ相談プログラムを開始します。

検査プログラムの途中で中断すると、診断選択画面に戻ります。中断方法の詳細は、「検査プログラムの途中で終了する」を参照してください。



検査プログラムを実施する

概要

下記の検査プログラムを実施することが出来ます。

- ・もの忘れ相談プログラム
- ・TDAS プログラム

検査プログラムを開始すると、画面に表示された文章が音声ガイダンスとしてヘッドフォンから流れます。

利用者は、音声に従って操作するよう指導してください。

もの忘れ相談プログラム


もの忘れ相談プログラムの流れ

もの忘れ相談プログラムは、下記の流れで行います。

□で囲まれている手順は、利用者本人が行います。

検査プログラムの途中で中断すると、診断選択画面に戻ります。

中断方法の詳細は、「検査プログラムの途中で終了する」を参照してください。

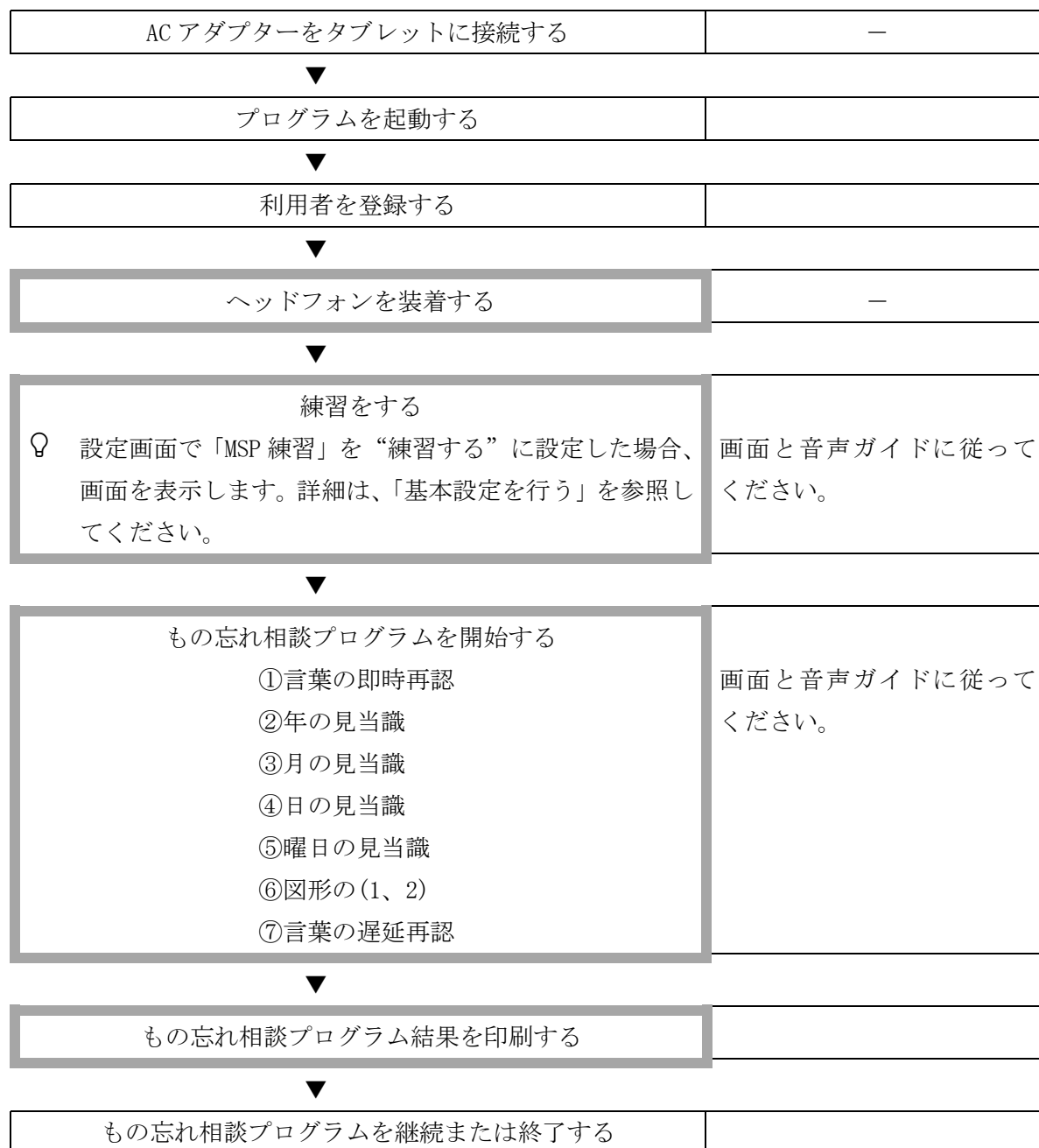

もの忘れ相談プログラム結果を表示・印刷する

設定画面で「結果画面表示」を“表示する”にした場合、すべての検査プログラムが終了すると、判定結果画面が表示され、もの忘れ相談プログラムの結果を表示します。

また、設定画面で「結果印刷」を“印刷する”にした場合、接続したプリンターで、もの忘れ相談プログラム結果が印刷されます。

【注】プリントしたもの忘れ相談プログラムの結果には、個人情報が含まれる場合がありますので取扱には注意してください。

結果表示例（もの忘れ相談プログラム）

【結果】
15~14点では特に問題ないと思われますが、
13~0点では認知機能の低下が疑われます。

項目	得点
言葉の即時再認	3 / 3
言葉の遅延再認	6 / 6
日時の見当識	4 / 4
図形の認識1	1 / 1
図形の認識2	1 / 1

チェック実施日	2024/08/02
ID	12345
総合点	15 / 15
経過時間	1分41秒

はじめに戻る

結果印刷例（もの忘れ相談プログラム）

もの忘れ相談プログラム チェックレポート

チェック実施日
2024年08月02日

ID	123	氏名	リムノ タロウ	様
サブID	12345	性別	男性	生年月日 昭和30年01月01日(満69歳)



アドバイス
総合得点 11点 / 15点
15~14点では特に問題ないと思われますが、
13~0点では認知機能の低下が疑われます。※

チェック項目	得点	判断と回答	正解
言葉の即時再認 今聞いたことを覚えているか尋ねる問題。	3 / 3	○ さくら ○ ねこ ○ でんしゃ	さくら ねこ でんしゃ
日時の見当識 年・月・日・曜日などが解っているか尋ねる問題。 ※一日の日にちのずれは正解として います。(△で表示)	3 / 4	○ 5年 ○ 4月 △ 19日 × 月曜日	5年 4月 20日 木曜日
言葉の遅延再認 さっき聞いたことを覚えているか尋ねる問題。	4 / 6	○ さくら × いぬ ○ でんしゃ	さくら ねこ でんしゃ
図形の認識 立方体、三角柱について違う角度から見たものを選ぶ問題。	1 / 1	○ 	
視空間認知機能を診る問題。	0 / 1	× 	

定期的に「もの忘れ相談プログラム」と対話しましょう 監修 鳥取大学医学部教授 浦上克哉

備考・その他提供情報

当該プログラムは、医療機器ではなく医療の診断、治療、予防を目的としておりません。
医療の診断には医療機器での受診が必要です。
※レポートの掲載については一般社団法人日本認知症予防学会ホームページ(<https://ninchishou.jp/publics/index/288/>) をご確認ください。

鳥取大学医学部保健学科

LMN-MSP01 01.00.000

もの忘れ相談プログラムを継続する

- 1 もの忘れ相談プログラム結果画面で、[はじめに戻る]を押します。

【結果】
15~14点では特に問題ないと思われますが、
13~0点では認知機能の低下が疑われます。

項目	得点
言葉の即時再認	3/3
言葉の遅延再認	6/6
日時の見当識	4/4
図形の認識1	1/1
図形の認識2	1/1

チェック実施日	2024/08/02
ID	12345

総合点	経過時間
15 / 15	1分41秒

はじめに戻る

- 2 自動的に画面が切り換わります。利用者を交替してください。

もの忘れ相談プログラムを開始した画面によって、自動的に切り換わる画面が下記のとおり異なります。

- ・ トップメニュー画面から開始した場合 …診断選択画面
- ・ 利用者情報確認画面から開始した場合 …利用者情報確認画面

検査プログラムの途中でひとつ前の画面に戻る、終了する

検査プログラムの途中でひとつ前の画面に戻る

- 1 画面の右上（下記参照）を2回押します。


この辺りを2回押す

今年は、令和何年でしょうか？

1年	2年	3年	4年	5年	6年
7年	8年	9年	10年	11年	12年
13年	14年	15年	16年	17年	18年
19年	20年	21年	22年	23年	24年
25年	26年	27年	28年	29年	30年

わからない

2 [ひとつ前の画面に戻る]を押します。

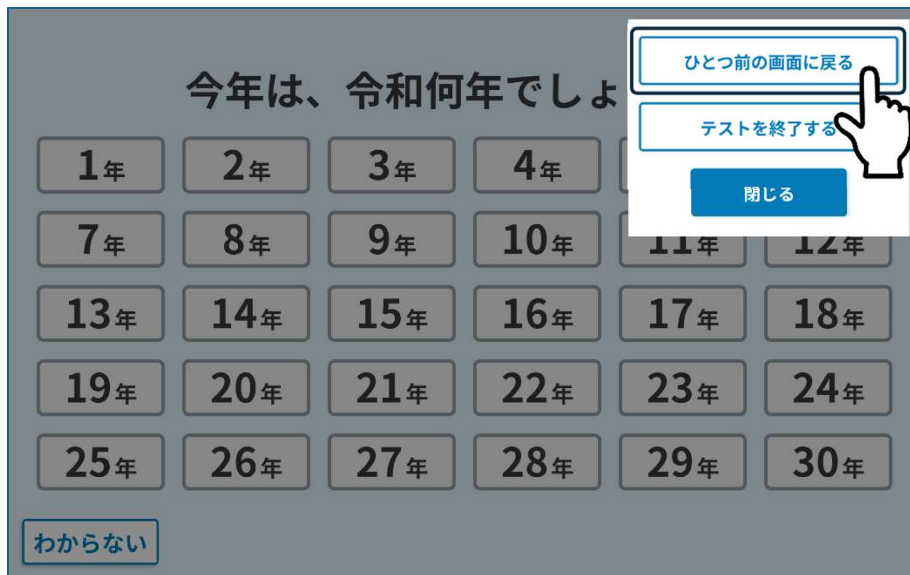

3 ひとつ前の画面に戻る確認ウィンドウが表示されます。[戻る]を押し、ひとつ前の画面に戻ります。



検査プログラムの途中で終了する

1 画面の右上（下記参照）を2回押します。

この辺りを2回押す

今年は、令和何年でしょうか？

1年	2年	3年	4年	5年	6年
7年	8年	9年	10年	11年	12年
13年	14年	15年	16年	17年	18年
19年	20年	21年	22年	23年	24年
25年	26年	27年	28年	29年	30年

わからない



2 [テストを終了する]を押します。

今年は、令和何年でしょ

1年	2年	3年	4年	11年	12年
7年	8年	9年	10年	17年	18年
13年	14年	15年	16年	23年	24年
19年	20年	21年	22年	29年	30年

わからない

ひとつ前の画面に戻る

テストを終了する

閉じる



3 終了の確認ウインドウが表示されます。終了を押します。



もの忘れ相談プログラム結果について

項目名	検査内容	備考	点数
言葉の即時再認	最近の記憶の確認	3つの単語を覚えているかを確認します。	各1点(3点満点)
日時の見当識	年月日、曜日などの記憶の確認	検査当日の年月日と曜日を確認します。	各1点(4点満点)
言葉の遅延再認	「言葉の即時再認」で聞いた言葉を記憶しているかの確認	「言葉の即時再認」で覚えた3つの単語を再度確認します。	各2点(6点満点)
図形認識1	図形の記憶の確認	立方体を用いて、視空間認知機能を診る問題です。 頭頂葉の障害を反映しており、アルツハイマー型認知症の発見に役立つ検査プログラムです。	1点
図形認識2	図形の記憶の確認	三角柱を用いて、視空間認知機能を診る問題です。 「図形認識1」よりも難易度が高い問題です。	1点
総合判定	合計点	15～14点では特に問題ないと思われますが、13～0点では認知機能の低下が疑われます。	15点

レポートの根拠については、一般社団法人日本認知症予防学会ホームページ (<https://ninchishou.jp/publics/index/288/>) を参照してください。

TDAS プログラム


TDAS プログラムの流れ

TDAS プログラムは、下記の流れで行います。

□で囲まれている手順は、利用者本人が行います。

検査プログラムの途中で中断すると、診断選択画面に戻ります。

中断方法の詳細は、「検査プログラムの途中で終了する」を参照してください。

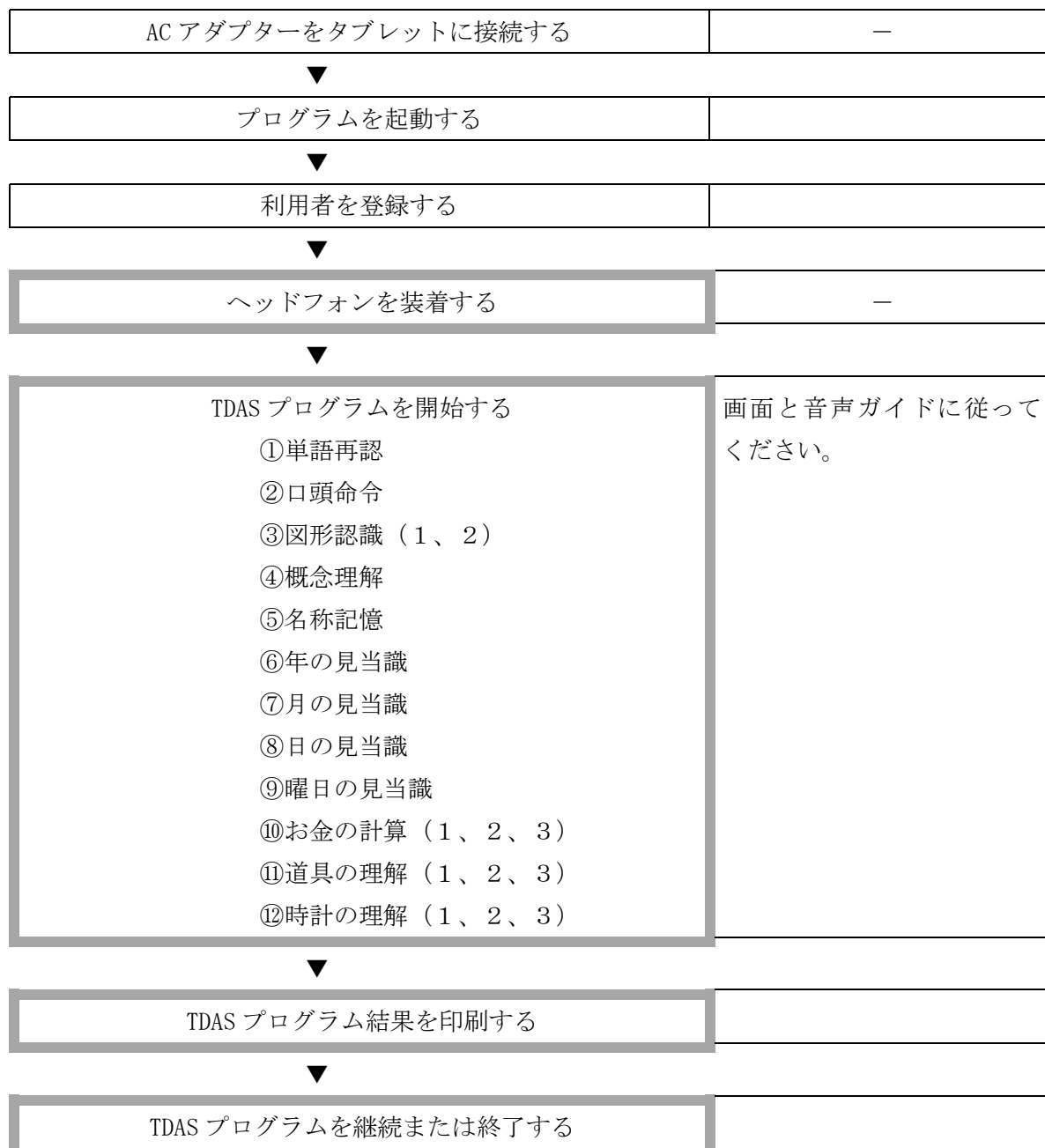

TDAS プログラム結果を表示・印刷する

設定画面で「結果画面表示」を“表示する”にした場合、すべての検査プログラムが終了すると、判定結果画面が表示され、TDAS プログラムの結果を表示します。

また、設定画面で「結果印刷」を“印刷する”にした場合、接続したプリンターで、TDAS プログラム結果が印刷されます。

【注】プリントした TDAS プログラム結果には、個人情報が含まれる場合がありますので取扱には注意してください。

結果表示例（TDAS プログラム）

結果を表示しますので、参考にしてください。 [はじめに戻る](#)

項目	失点
単語再認	
1回目 2回目 3回目	5 / 72
3/24 1/24 1/24	
口頭命令	0 / 2
図形認識	1 / 4
概念理解	0 / 5
名称記憶	0 / 5
見当識	0 / 4
お金計算	0 / 3
道具理解	0 / 3
時計理解	0 / 3

チェック実施日 2024/08/02
ID 54321

総合失点の推移

2024/08/02

総合点 6 / 101 経過時間 11分00秒

結果印刷例（TDAS プログラム）

TDASプログラム チェックレポート チェック実施日 2024年08月02日

ID 123	氏名 リムノ タロウ 様
サブID 12345	性別 男性 生年月日 昭和30年01月01日(満68歳)

アドバイス

総合失点: **24***点 (101点中) 総合時間: **11**分

0～6点以下では特に問題ないと思われますが、7～13点以下では軽度認知機能の低下が疑われます。14点以上では認知症が疑われます。

TDASプログラムでは間違えた点数を算出します。

検査項目	失点			総合失点の推移と傾向			
	1回目	2回目	3回目	実施日	前々回 2024年 08月10日	前回 2024年 09月10日	今回 2024年 10月10日
単語再認	* / 24	* / 24	* / 24	推移			
合計	0* / 72						
口頭命令	1 / 2			傾向			
図形認識	3 / 4						
概念理解	5 / 5						
名称記憶	4 / 5						
見当識	3 / 4						
お金計算	2 / 3						
道具理解	3 / 3						
時計理解	3 / 3						

備考・その他提供情報

当該プログラムは、医療機器ではなく医療の診断、治療、予防を目的としておりません。
医療の診断には医師の判断での受診が必要です。

鳥取大学医学部保健学科 LMN-MSP01 01.00.000

TDAS プログラムを継続する

1 TDAS プログラム結果画面で、[はじめに戻る]を押します。

結果を表示しますので、参考にしてください。

項目	失点
単語再認	5 / 72
1回目	
2回目	
3回目	3/24
口頭命令	0 / 2
図形認識	1 / 4
概念理解	0 / 5
名称記憶	0 / 5
見当識	0 / 4
お金計算	0 / 3
道具理解	0 / 3
時計理解	0 / 3

チェック実施日 2024/08/02
ID 54321

はじめに戻る

総合失点の推移

0
7
1
3

2024/08/02

総合点 6 / 101
経過時間 11分00秒

2 自動的に画面が切り換わります。利用者交替をします。

TDAS プログラムを開始した画面によって、切り換わる画面が下記のとおり異なります。

- ・ トップメニュー画面から開始した場合 …診断選択画面
- ・ 利用者情報確認画面から開始した場合 …利用者情報確認画面

検査プログラムを終了する（トップメニュー画面に戻る）

検査プログラムの途中で終了する

1 画面の右上（下記参照）を2回押します。

この辺りを2回押す

今年は、令和何年でしょうか？

1年 2年 3年 4年 5年 6年

7年 8年 9年 10年 11年 12年


13年 14年 15年 16年 17年 18年

19年 20年 21年 22年 23年 24年

25年 26年 27年 28年 29年 30年

わからない

2 [テストを終了する]を押します。

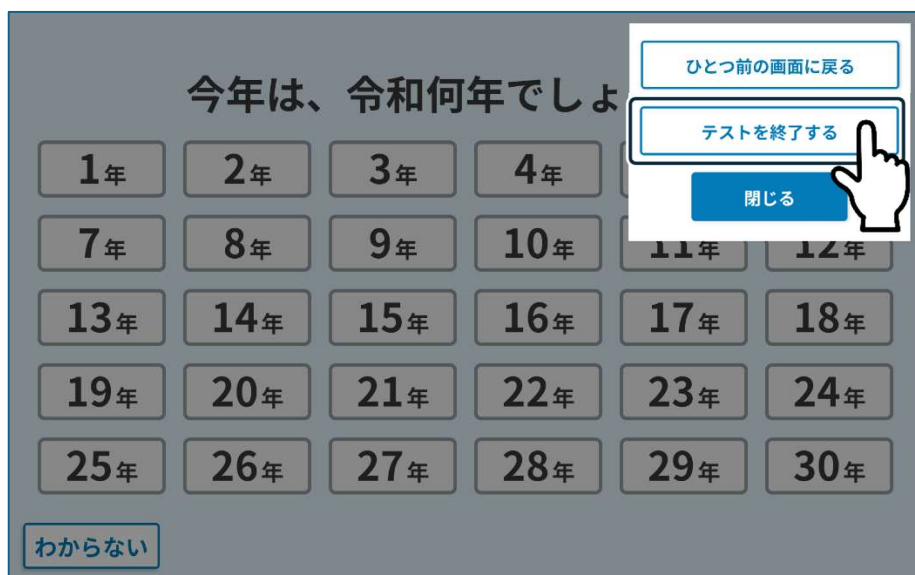

3 終了の確認ウインドウが表示されます。終了を押します。



TDAS プログラム結果について

項目名	検査内容	備考	点数
単語再認	最近の記憶の確認	12 個の単語を覚え、その後 24 個の単語について、「あった」か「なかった」かを回答する問題です。計 3 回行います。	1 回あたり 0～24 点 (すべて間違えると 24 点) ×3 回
口頭命令	音声に従う検査	「6 を押してください」、「3 と 8 を押してください」という 2 つの命令に従って、操作します。	0～2 点 (すべて間違えると 2 点)
図形認識	図形の記憶の確認	図形を 5 秒間表示している間に覚えて、その後、覚えた図形を選択肢から選びます。 「ひし形」、「2 つの重なった長方形」、「立方体」、「三角柱」の 4 つを出題。	0～4 点 (すべて間違えると 4 点)
概念理解	手紙を出す正しい手順の理解の確認	手紙を書いてポストに投稿する順序を答えます。 前後の行為のつじつまが合っていれば、正解とします。	0～5 点 (間違えると 5 点)
名称記憶	指の名称記憶の確認	指の名前を回答する問題です。 「親指」、「人差し指」、「中指」、「薬指」、「小指」の 5 つを出題します。	0～5 点 (すべて間違えると 5 点)
見当識	年月日と曜日の確認	検査当日の年月日と曜日を回答する問題です。	0～4 点 (すべて間違えると 4 点)
お金の計算	指示された金額を硬貨の組合せで支払えるかどうかの確認	「36 円」、「128 円」、「202 円」の 3 回の支払いが正しくできるかを確認する問題です。	0～3 点 (すべて間違えると 3 点)
道具の理解	日用品の用途の理解の確認	「ほうきとちりとり」、「ペンチ」、「櫛」の 3 つの使用方法について質問し、6 つの選択肢から回答を選ぶ問題です。	0～3 点 (すべて間違えると 3 点)
時計の理解	時計と時間の理解の確認	時計（アナログ）の時刻についての質問し、正しい回答を選ぶ問題です。	0～3 点 (すべて間違えると 3 点)
総合判定	合計点	全問正解の場合 0 点、全問不正解の場合 101 点になります。	0～101 点

データ管理機構

概要

本プログラムでは、利用者情報（姓名、ID、生年月日、性別など）を入力すると利用者情報が保存されるとともに、検査プログラムの実施時に、利用者の検査結果データ（もの忘れ相談/TDAS プログラム結果）を利用者 ID で関連付けて保存します。

保存された利用者情報および検査データは、データ管理画面で管理します。検査結果データ管理画面では以下の操作を行うことができます。

- ・利用者情報の事前登録・編集・削除
- ・検査プログラムデータの表示
- ・検査プログラムデータの検索
- ・検査プログラムデータの削除・ファイルリスト（検査プログラムデータ・検索結果）の一括削除
- ・ファイルリスト（利用者情報・検査プログラムデータ・検索結果）の一覧印刷
- ・ファイルリスト（利用者情報・検査プログラムデータ・検索結果）の CSV 形式による書出し
- ・検査プログラムデータ（検査プログラム結果）のレポート印刷

データ管理画面を開く

トップメニュー画面で[データ管理]を押して、データ管理画面を開きます。



データ管理画面

[データ一覧（もの忘れ／TDAS）タブ]
もの忘れ相談プログラムと TDAS プログラムのデータを管理します。

[バックアップ]タブ
バックアップ、復元を行います。

[利用者一覧]タブ
利用者情報を管理します。

The screenshot shows a web application interface for data management. At the top, there is a blue header bar with two links: 'トップメニューへ' (To Top Menu) and 'ひとつ前に戻る' (Go Back One Step). Below the header, there are three tabs: '利用者一覧' (User List), 'データ一覧(もの忘れ/TDAS)' (Data List (Memory Loss/TDAS)), and 'バックアップ' (Backup). The 'データ一覧(もの忘れ/TDAS)' tab is currently selected. Below the tabs, there is a search section titled '利用者検索' (User Search). It contains several input fields: 'セイ' (Surname) with 'リムノ' entered, 'メイ' (Name) with 'タロウ' entered, '性別' (Gender) with checkboxes for '未選択' (Selected), '男性' (Male), and '女性' (Female), 'ID' with '000000' entered, 'サブID' (Sub ID) with '000000' entered, and '日付' (Date) with '2024/08/02' entered. There are also 'クリア(全件表示)' (Clear (Show All)) and '検索' (Search) buttons.

利用者情報を事前登録・検索・変更・削除する

データ管理画面の「利用者一覧」タブを押して、利用者一覧画面を開きます。

利用者一覧画面

The screenshot shows the '利用者一覧' (User List) screen. The interface includes a top navigation bar with 'トップメニューへ' (Back to Top Menu) and 'ひとつ前に戻る' (Back One Page). Below this is a tab bar with '利用者一覧' (selected), 'データ一覧(もの忘れTDAS)', and 'バックアップ'. The main area features a search form with fields for 'セイ' (Last Name), 'メイ' (First Name), '性別' (Gender), 'ID', 'サブID', and '日付' (Date). There are buttons for 'クリア(全件表示)' (Clear/Show All) and '検索' (Search). Below the search form is a '+ 新規登録' (New Registration) button. To the right of the table are buttons for '一括削除' (Batch Delete), '一覧印刷' (Print List), and 'CSV書き出し' (Export CSV). The table itself has columns for '登録日' (Registration Date), 'ID', 'サブID', '名前' (Name), '性別' (Gender), '生年月日' (Date of Birth), and a '詳細' (Details) link. At the bottom, there are pagination controls showing page 1 of 2.

[トップメニューへ]
トップメニュー画面を表示します。

[クリア (全件表示)]
検索で絞り込んだデータをクリアします。

[検索]
利用者データを検索条件の内容で検索します。

利用者データの検索条件を入力します。

[新規登録]
利用者登録画面を表示します。

利用者データの一覧を表示します。

利用者データの一覧ページのページ数を指定します。

[一括処理]
利用者のデータを一括で処理します。

登録日	ID	サブID	名前	性別	生年月日	詳細
2024/08/20	12345		リムノ タロウ	男性	大正15年 1月01日	詳細 >
2024/08/19	3333		リムノ ハナコ	女性	昭和12年 3月04日	詳細 >
2024/08/18	1		リムノ タロウ	男性	昭和30年 1月01日	詳細 >
2024/08/18	2		リムノ ダイスケ	男性	大正15年 1月01日	詳細 >
2024/08/17	12345678901234567890	123456789012	リムノ タロウ	男性	昭和30年 1月01日	詳細 >
2024/08/16	54321		リムノ ダイスケ	男性	昭和10年 2月31日	詳細 >
2024/08/16	0987654321		リムノ ハナコ	女性	昭和10年 2月31日	詳細 >
2024/08/15	1234567890987654321	9876543210	リムノ カズヨ	女性	昭和14年 8月02日	詳細 >


利用者情報を事前登録する

利用者情報を事前に登録します。

- 1 利用者一覧画面で[新規登録]を押し、利用者登録画面を表示します。



- 2 画面のキーボードパネルで各項目を入力します。

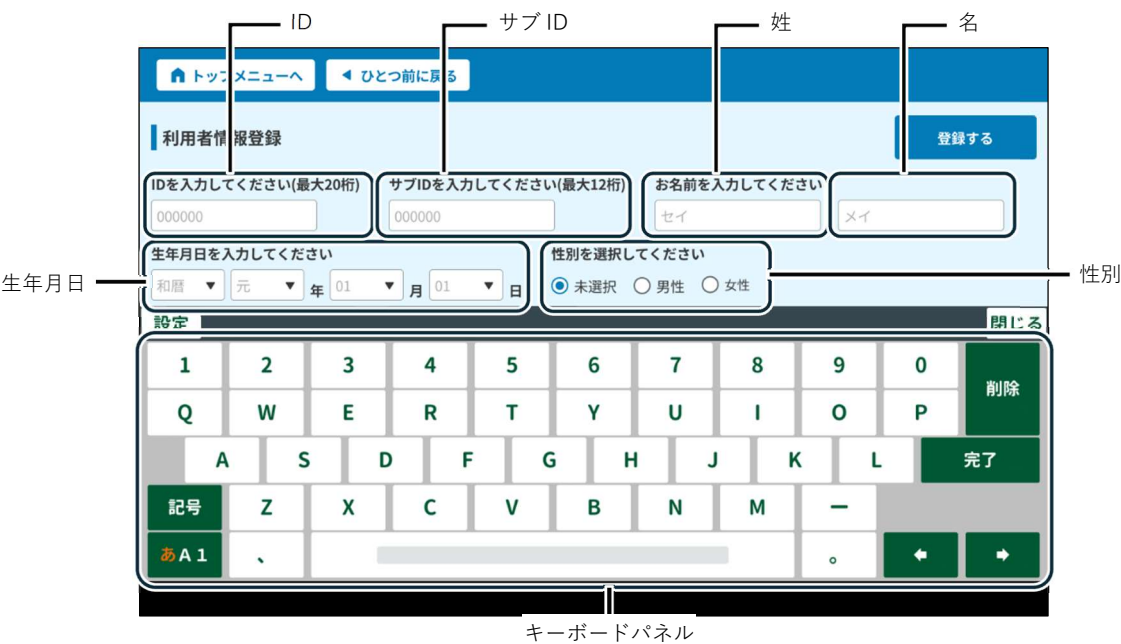

項目	設定	説明
ID	20 桁以内の 任意の半角数字	キーボードパネルで任意の番号を入力します。
サブ ID	12 桁以内の 任意の半角数字	
性別	未選択／男性／女性	性別を選択します。
生年月日	プルダウンから選択	[▼]を押して、プルダウンから生年月日を設定します。
セイ	全角 10 文字以内の 任意の姓	キーボードパネルで利用者の名前を入力します。
メイ	全角 10 文字以内の 任意の名	

3 [登録する]を押して、設定を確定します。

トップメニューへ | ひとつ前に戻る

利用者情報登録

登録する

IDを入力してください(最大20桁) サブIDを入力してください(最大12桁) お名前を入力してください

123 45 リムノ タロウ

生年月日を入力してください 性別を選択してください

昭和 12 年 3 月 4 日 ☐ 未選択 ☒ 男性 ☐ 女性

設定 閉じる

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	削除
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	
	A	S	D	F	G	H	J	K	L	完了
記号	Z	X	C	V	B	N	M	—		
あA1	,									

4 確認ウインドウが表示されます。[閉じる]を押して、利用者登録を完了します。

トップメニューへ | ひとつ前に戻る

利用者情報編集

編集完了

利用者情報を登録しました。

閉じる

利用者情報を検索する

登録済みの利用者情報を検索します。

利用者一覧画面で検索条件を入力し、[検索]を押します。



The screenshot shows the '利用者検索' (User Search) form. The search criteria are: セイ (Last Name) 'リムノ',メイ (First Name) 'タロウ',性別 (Gender) with checkboxes for '未選択' (Selected), '男性' (Male), and '女性' (Female),ID '000000' ~ '55555',サブID (Sub ID) '000000' ~ '000000', and日付 (Date) '2024/03/01' ~ '2024/04/30'. The '検索' (Search) button is highlighted with a hand cursor. Other buttons include 'クリア(全件表示)' (Clear/Show All), '+ 新規登録' (New Registration), '一括削除' (Batch Delete), '一覧印刷' (Print List), and 'CSV書き出し' (Export CSV). The table header below the form lists columns: 登録日 (Registration Date), ID, サブID (Sub ID), 名前 (Name), 性別 (Gender), and 生年月日 (Date of Birth).

日付を入力する

1 日付の入力欄を押します。



This screenshot is identical to the previous one, but the '日付' (Date) input field, which contains '2024/03/01', is highlighted with a hand cursor, indicating the next step in the process.

2 カレンダーから該当の日付を選択します。



ID またはサブ ID を入力する

1 ID 入力欄を押します。

2 画面に表示されたキーボードパネルで ID を入力します。

姓または名を入力する

1 セイまたはメイの入力欄を押します。

トップメニューへ ◀ ひとつ前に戻る

利用者一覧 データ一覧(もの忘れ/TDAS) バックアップ

利用者検索

セイ リムノ メイ タロウ 性別 ☒ 未選択 ☒ 男性 ☒ 女性

ID 000000 ~ 55555 サブID 000000 ~ 000000

日付 2024/03/01 ~ 2024/04/30

クリア(全件表示) 検索

+ 新規登録 一括削除 一覧印刷 CSV書き出し

登録日	ID	サブID	名前	性別	生年月日
-----	----	------	----	----	------

2 画面に表示されたキーボードパネルで姓または名を入力します。

性別で絞り込む

下記のいずれかを選択します。

- ・ 未選択 性別を未選択の状態で利用者情報を検索します。
- ・ 男性 男性の利用者情報を検索します。
- ・ 女性 女性の利用者情報を検索します。

登録内容を変更する

登録済みの利用者情報を変更します。

- 1 利用者一覧画面で、検索条件を入力し、「検索」を押して、対象の利用者を絞り込みます。
- 2 変更する利用者の[詳細 >]を押し、利用者情報確認画面を表示します。

[トップメニューへ](#)
[ひとつ前に戻る](#)

[利用者一覧](#)
[データ一覧\(もの忘れ/TDAS\)](#)
[バックアップ](#)

利用者検索

セイ メイ
 性別 ☒ 未選択 ☒ 男性 ☒ 女性

ID ~ サブID ~

日付 ~

[クリア\(全件表示\)](#)
[検索](#)

[+ 新規登録](#)
[一括削除](#)
[一覧印刷](#)
[CSV書き出し](#)

登録日	ID	サブID	名前	性別	生年月日	
2024/08/20	12345		リムノ タロウ	男性	大正15年01月01日	詳細 >
2024/08/19	3333		リムノ ハナコ	女性	昭和12年03月04日	詳細 >
2024/08/18	1		リムノ タロウ	男性	昭和30年01月01日	詳細 >

3 [変更する]を押し、利用者情報編集画面を表示します。

[トップメニューへ](#)
[ひとつ前に戻る](#)

利用者情報確認

[削除する](#)
[変更する](#)

ID	54321
サブID	
お名前	リムノ タロウ
生年月日	大正15年3月2日
性別	男性

[もの忘れチェックを開始する](#)
[TDASチェックを開始する](#)

4 該当項目を編集し、[編集完了]を押して変更内容を確定します。

The screenshot shows the '利用者情報編集' (Edit User Information) form. At the top right, there is a blue button labeled '編集完了' (Edit Complete). A hand icon is pointing at this button. The form contains several input fields: 'IDを入力してください(最大20桁)' with the value '123', 'サブIDを入力してください(最大12桁)' with the value '45', and 'お名前を入力してください' with the value 'リムノ タロウ'. Below these are date and gender selection fields. A virtual keyboard is overlaid on the bottom half of the screen, featuring a '完了' (Complete) button in the bottom right corner. The keyboard also includes a '削除' (Delete) button and various alphanumeric keys.

5 [閉じる]を押して、利用者情報の変更を完了します。

The screenshot shows a confirmation dialog box titled '利用者情報を変更しました。' (User information has been changed). The dialog box has a green checkmark icon at the top. At the bottom, there is a blue button labeled '閉じる' (Close). A hand icon is pointing at this button. The background shows the '利用者情報編集' form, which is dimmed. The '編集完了' button is visible in the top right corner of the background form.

登録内容を削除する

登録済みの利用者情報を削除します。

【注】・一度削除すると、元に戻せません。

・利用者情報を削除すると、その利用者の検査プログラム結果も削除されます。

必ず、必要な検査プログラムデータは、外部記録媒体にコピー後、削除してください。

1 利用者一覧画面で、検索条件を入力し、[検索]を押して、対象の利用者を絞り込みます。

2 削除する利用者の[詳細 >]を押し、利用者情報確認画面を表示します。

登録日	ID	サブID	名前	性別	生年月日	
2024/08/20	12345		リムノ タロウ	男性	大正15年01月01日	詳細 >
2024/08/19	3333		リムノ ハナコ	女性	昭和12年03月04日	詳細 >

3 [削除する]を押します。

ID	54321
サブID	
お名前	リムノ タロウ
生年月日	大正15年3月2日
性別	男性

4 確認ウインドウが表示されます。[削除する]を押します。[閉じる]を押すと、削除されません。



5 確認ウインドウが表示されます。[削除する]を押して、削除を確定します。[閉じる]を押すと、削除されません。



6 [閉じる]を押して、利用者情報の削除を完了します。



一括処理をする

一括処理では、以下の処理を行うことができます。

- ・一覧印刷
- ・一覧 CSV
- ・一括削除

一覧印刷をする

[一覧印刷]を押します。

利用者データの一覧が表示されます。

The screenshot shows a web application interface for user management. At the top, there are navigation links: 'トップメニューへ' and 'ひとつ前に戻る'. Below these are three tabs: '利用者一覧' (selected), 'データ一覧(もの忘れ/TDAS)', and 'バックアップ'. The main section is titled '利用者検索' and contains search filters for 'セイ' (Last Name: リムノ), 'メイ' (First Name: タロウ), '性別' (Gender: checkboxes for 未選択, 男性, 女性), 'ID' (000000 ~ 55555), 'サブID' (000000 ~ 000000), and '日付' (Date: 2024/03/01 ~ 2024/04/30). There are buttons for 'クリア(全件表示)' and '検索'. Below the search filters, there are three buttons: '+ 新規登録', '一括削除', and '一覧印刷' (highlighted with a hand cursor). To the right of '一覧印刷' is a button for 'CSV書き出し'. Below these buttons is a table with columns: '登録日', 'ID', 'サブID', '名前', '性別', '生年月日', and a '詳細 >' link. The table contains one row of data: 2024/08/20, 12345, リムノ タロウ, 男性, 大正15年01月01日.

登録日	ID	サブID	名前	性別	生年月日	詳細 >
2024/08/20	12345		リムノ タロウ	男性	大正15年01月01日	

利用者データ一覧

2024/08/02

検索条件	日付	2024/08/02 ~ 2024/08/20	サブID	1 ~ 123456789012
	ID	1 ~ 12345678901234567890		
	名前	(なし)	性別	(なし)

一覧

番号	日付	ID	サブID	名前	性別	生年月日
1	2024/08/20	12345		リムノ タロウ	男性	1926/01/01
2	2024/08/19	3333		リムノ ハナコ	女性	1937/03/04
3	2024/08/18	1		リムノ タロウ	男性	1955/01/01
4	2024/08/17	2		リムノ ダイスケ	男性	1926/01/01
5	2024/08/17	12345678901234567890	123456789012	リムノ タロウ	男性	1933/01/01
6	2024/08/16	987654321		リムノ ハナコ	女性	1935/12/31
7	2024/08/15	1234567	9876543210	リムノ カズヨ	女性	1939/08/02
8	2000/00/00	00000000000000000000	000000000000	リムノ イチロウ	男性	1927/01/01
9	2000/00/00	00000000000000000000	000000000000	リムノ ジロウ	男性	1928/02/02
10	2000/00/00	00000000000000000000	000000000000	リムノ サブロウ	男性	1930/04/10
11	2000/00/00	00000000000000000000	000000000000	リムノ シロウ	男性	1933/05/31
12	2000/00/00	00000000000000000000	000000000000	リムノ ゴロウ	男性	1935/08/18
13	2000/00/00	00000000000000000000	000000000000	リムノ ハナコ	女性	1937/03/04

CSV データを書き出す

1 [CSV 書き出し]を押します。

The screenshot shows a web application interface for user management. At the top, there are navigation links: 'トップメニューへ' and 'ひとつ前に戻る'. Below these are three tabs: '利用者一覧' (selected), 'データ一覧(もの忘れ/TDAS)', and 'バックアップ'. The main section is titled '利用者検索' and contains search filters for 'セイ' (Last Name), 'メイ' (First Name), '性別' (Gender), 'ID', 'サブID', and '日付' (Date). There are buttons for 'クリア(全件表示)' and '検索'. Below the search filters, there are three buttons: '+ 新規登録', '一括削除', and 'CSV書き出し'. A hand icon points to the 'CSV書き出し' button. Below the buttons is a table with columns: '登録日', 'ID', 'サブID', '名前', '性別', and '生年月日'. The table contains one row of data: '2024/08/20', '12345', 'リムノ タロウ', '男性', and '大正15年01月01日'. There is a '詳細 >' link at the end of the row.

2 画面の手順に従い、CSV データを書き出します。

一括で削除する

絞り込んだデータを一括削除します。

【注】・一度削除すると、元に戻せません。

・利用者情報を削除すると、その利用者の検査プログラム結果も削除されます。

必ず、必要な検査プログラムデータは、外部記録媒体にコピー後、削除してください。

1 [一括削除]を押します。

The screenshot shows the same web application interface as before. The '一括削除' button is now highlighted with a hand icon, indicating it should be clicked. The table below the buttons shows the same data as in the previous screenshot.

2 確認ウィンドウで[OK]を押します。

[キャンセル]を押すと、削除されません。

プログラム検査結果を確認・印刷・削除する

データ管理画面の「データ一覧」タブを押して、データ一覧画面を開きます。

データ一覧画面

[トップメニューへ]
トップメニュー画面を表示します。

[クリア (全件表示)]
検索で絞り込んだデータをクリアします。

[検索]
検査プログラムデータを検索条件の内容で検索します。

検査プログラムデータの検索条件を入力します。
※データ一覧画面では、TDASプログラムの所要時間や、今まで実施した検査プログラムの合計点から絞り込み検索することができます。

[新規登録]
利用者登録画面を表示します。

データの一覧を表示します。

[一括処理]
データを一括で処理します。

実施日	ID	サブID	名前	性別	生年月日	操作
2024/08/20	12345		リムノ タロウ	男性	大正15	01月01日 もの忘れ >
2024/08/19	3333		リムノ ハナコ	女性	昭和12	03月04日 TDAS >
2024/08/18	1		リムノ タロウ	男性	昭和30	01月01日 もの忘れ >
2024/08/18	2		リムノ ダイスケ	男性	大正15	01月01日 TDAS >
2024/08/17	12345678901234567890	123456789012	リムノ タロウ	男性	昭和30	01月01日 もの忘れ >
2024/08/16	0987654321		リムノ ハナコ	女性	昭和10	12月31日 TDAS >
2024/08/15	1234567890987654321	9876543210	リムノ カズヨ	女性	昭和14	08月02日 もの忘れ >

結果の詳細を確認する

- 1 データ一覧画面で検索条件を入力し、[検索]を押して、対象の検査プログラムデータを絞り込みます。
- 2 詳細を確認したい検査プログラム[もの忘れ]、[TDAS]のボタンを押します。



- 3 結果詳細画面が表示されます。[ひとつ前に戻る]を押して、データ一覧画面へ戻ります。

The screenshot shows the result detail screen for 'もの忘れ相談プログラム結果詳細'. The top navigation bar has a 'ひとつ前に戻る' button. The main content area shows the test details and a table of results.

トップメニューへ ◀ ひとつ前に戻る

もの忘れ相談プログラム結果詳細

チェック実施日時 2024/08/02 11:01~11:13

施設番号 ID 12345 サブID

名前 リムノ タロウ

生年月日 大正15年01月01日 性別 男性

合計	経過時間	配点	正解点数	不正解点数
	1分	15	15	0

問題	回答	正解	結果	経過時間	配点	正解点数	不正解点数
今覚えてもらった言葉を3つ選んでください。	さくら,ねこ,でんしゃ	さくら,ねこ,でんしゃ	○	5秒	3	3	0
今年は、令和何年でしょうか？	2	2	○	6秒	1	1	0
今月は、何月でしょうか？	3	3	○	5秒	1	1	0
今日は、何日でしょうか？	25	25	○	3秒	1	1	0
今日は、何曜日でしょうか？	水	水	○	3秒	1	1	0
上の図形を違う角度から見たものを、下の5つの図形の中から1つ選んでください。			○	7秒	1	1	0
上の図形を違う角度から見たものを、下の5つの図形の中から1つ選んでください。			○	10秒	1	1	0
先ほど覚えてもらった言葉を3つ選んでください。	さくら,ねこ,でんしゃ	さくら,ねこ,でんしゃ	○	5秒	6	6	0

結果を印刷する

- 1 データ一覧画面で検索条件を入力し、[検索]を押して、対象の検査プログラムデータを絞り込みます。
- 2 印刷する検査プログラムデータ[もの忘れ]、[TDAS]を押します。



2024/08/17	12345678901234567890	123456789012	リムノ タロウ	男性	昭和30年01月01日	もの忘れ >
2024/08/16	0987654321		リムノ ハナコ	女性	昭和10年12月31日	TDAS >
2024/08/15	1234567890987654321	9876543210	リムノ カズヨ	女性	昭和14年08月02日	もの忘れ >

< 1 2 >

- 3 結果詳細画面が表示されます。[単票印刷]を押します。



トップメニューへ ◀ ひとつ前に戻る

もの忘れ相談プログラム結果詳細

削除する 単票印刷

チェック実施日時 2024/08/02 11:01~11:13

施設番号 ID 12345 サブID

名前 リムノ タロウ

生年月日 大正15年01月01日 性別 男性

合計	経過時間	配点	正解点数	不正解点数
	1分	15	15	0

問題	回答	正解	結果	経過時間	配点	正解点数	不正解点数
今覚えてもらった言葉を3つ選んでください。	さくら,ふこ,さんしゅ	さくら,ふこ,さんしゅ	○	50	5	5	0

印刷例は、「検査プログラム結果印刷例(もの忘れ相談プログラム)」と「検査プログラム結果印刷例(TDASプログラム)」を参照してください。

結果を削除する

- 1 データ一覧画面で検索条件を入力し、[検索]を押して、対象の検査プログラムデータを絞り込みます。
- 2 削除する検査プログラムデータ[もの忘れ]、[TDAS]を押します。



- 3 結果詳細画面が表示されます。[削除する]を押します。



- 4 確認ウインドウが表示されます。[削除する]を押して、削除を確定します。
【注】一度削除すると、元に戻せません。[閉じる]を押すと、削除されません。




5 [閉じる]を押して、データの削除を完了します。



データベースをバックアップする

1 データ管理画面の[バックアップ]タブを押して、バックアップ画面を開きます。

2 [バックアップ]を押します。

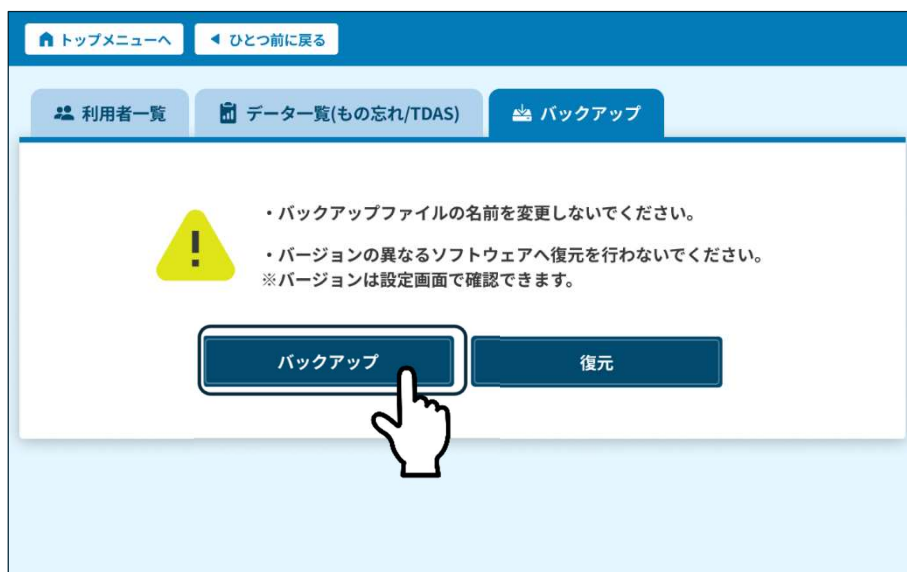

バックアップから復元する

- 1 データ管理画面の[バックアップ]タブを押して、バックアップ画面を開きます。
- 2 [復元]を押します。

